

インスリン セーフティシリンジ



特徴

■ 注射針を内筒に収納

プランジャーを引く事で注射針を筒の中に収納

■ 再び出てくる事の無い安全設計

セーフティーロック機構で針が再び出る事を防止



忙しい医療現場の針さしトラブルを軽減します。

■ リキャップでの針さし

■ 廃棄時の針さし

インスリンセーフティシリンジは

針が引っ込み、戻らない構造でトラブルの元となる行動自体を減らす事で発生率を軽減します。

HIV・肝炎・梅毒といった感染症から医療従事者を守るために開発されました。

使い方動画（1分20秒）はコチラから

[ICST Youtube チャンネル](#)

機器の使い方

商品説明 など

今後紹介していきます
チャンネル登録をお願いします。



インスリンセーフティリンジ 詳しい使用方法

3 ステップで 素早く安全

01



- プランジャーを押し込みます。
- プランジャーと針が固定されます。

02



- プランジャーを引くと針が引っ込みます。
- カチッという感触があるまで引いてください。

03



- プランジャーを折って廃棄します。
- 引っ込めた針が戻るのを防ぎます。

使い方動画（1分20秒）もご用意しています。

ICST Youtube チャンネル ▶

機器の使い方

商品説明 など

今後紹介していきます
チャンネル登録をお願いします。




ラインナップ

タイプを表からお選びください

タイプ	容量	1箱あたり
29G×1/2"	0.5mL (50単位まで)	100本
30G×5/16"	1mL (100単位まで)	100本

製造販売業者

 株式会社 ICST

〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目17-1 S-4タワー2F
Tel: 048-857-8026 Fax: 048-857-8041
HP: <https://icst.jp/>

代理店

